

MASQUE BARRIERE UNSI REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone
mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

De quoi sont constitués les masques Si-Mask™ & Si-Mask^{Kids} ?

Le masque Si-Mask™ version adulte est constitué de :

- un demi-masque en silicone ajustable au niveau du nez
- deux kits de brides, en silicone également, permettant à l'utilisateur de mettre en place le masque suivant ses préférences (tour d'oreille ou tour de tête)
- un kit porte-filtre, également en silicone, qui permet de maintenir le filtre pendant l'utilisation
- 20 filtres sont livrés avec l'ensemble des pièces en silicone, qui devront être ensuite réapprovisionné dans le commerce par l'utilisateur.

Le masque Si-Mask^{Kids} version enfant est constitué de :

- un demi-masque en silicone ajustable au niveau du nez
- un kit de brides, en silicone également, permettant à l'utilisateur de mettre en place le masque en tour de tête
- une rondelle bloque-filtre, également en silicone, qui permet de maintenir le filtre pendant l'utilisation
- 20 filtres sont livrés avec l'ensemble des pièces en silicone, qui devront être ensuite à réapprovisionner dans le commerce par l'utilisateur.

Que contiennent les kits Si-Mask™ & Si-Mask^{Kids} ?

Les kits de départ contiennent :

- le masque en silicone,
- une bague en silicone servant de support de filtre,
- un jeu de sangles pour mise en place en tour de tête,
- un jeu de sangles pour mise en place derrière les oreilles (uniquement pour la version adulte),
- un sachet de 20 filtres,
- une notice d'utilisation,

le tout livré dans un sachet PE thermo-soudé, réutilisable avec fermeture zip.

Quels sont les poids des masques de la gamme Si-Mask™ ?

Le masque Si-Mask™ adulte, entièrement équipé, pèse environ 100 gr +/- 10 gr en fonction des sangles utilisées (tour de tête ou derrière les oreilles). Le masque Si-Mask^{Kids} entièrement équipé pèse 90gr +/- 10gr.

Quelles sont les dimensions des masques de la gamme Si-Mask™ ?

Le masque Si-Mask™ adulte est conçu pour répondre aux préconisations décrites dans la spécification AFNOR S76-001 du 27/03/2020, résumé par le schéma ci-dessous :

MASQUE BARRIERE UNSI REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone
mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

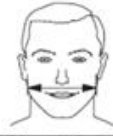


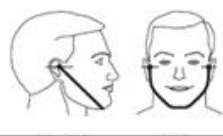
			
Distance bigoniale 132.5 – 144.5 mm	Longueur menton-sellion 123 – 135 mm	Distance interpupillaire 65 – 71 mm	Arc bitragus-gnathion 295 – 315 mm

Figure 2 — Schéma des dimensions à prendre en compte

Sur notre gamme Si-Mask (tant sur la version adulte que sur la version enfant), la souplesse du silicone, et la barrette nasale ajustable permettent un ajustement adapté au visage de chacun. Les kits de sangles également ajustables permettent d'optimiser le confort de chacun.

Attention, le port de barbe, certains traits de morphologie ainsi que la présence de bijoux (de type piercing par exemple) pourraient réduire l'efficacité du masque.

Quel type de protection offre la gamme Si-Mask™ ?

Les masques de la gamme Si-Mask™ ont été testés en filtration et en résistance respiratoire par un laboratoire indépendant; le filtre proposé (coton, microfibrilles polyester, polyester), offre un taux de filtration aux particules de 3 µm de plus de 98% (critère UNSI : >90%) et une respirabilité de 13,2 Pa/cm² (critère UNSI : < 60 Pa/cm²).

Comment se situe la gamme Si-Mask™ en termes de classification ?

Les exigences de la note d'information interministérielle du 29 Mars 2020 spécifient uniquement la capacité de filtration (90% ou 70%) des particules de 3µm émises par le porteur et classe les masques tissus suivant 2 catégories: UNSI et UNS2.

Les performances des masques de la gamme Si-Mask™ le classent sous la catégorie UNSI.

Où trouver les recharges de filtres des masques de la gamme Si-Mask™ ?

Le filtre des masques de la gamme Si-Mask est un disque démaquillant de la marque CIEN distribué chez LIDL (moins de 1 € le paquet de 140 pièces), composé à 60% de coton, 20% de microfibrilles polyester et 20% de Polyester, une solution très économique.

Nous travaillons d'ores et déjà sur un média filtrant encore plus performant, utilisable sur le masque existant, des tests sont en cours ; tous les acquéreurs d'un ou plusieurs masques de la gamme Si-Mask™ seront tenus informés de nos avancées et des résultats obtenus.

MASQUE BARRIERE UNSI
REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone
mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

Quel est le temps d'utilisation préconisé des masques de la gamme Si-Mask™ ?

Un filtre a un temps d'utilisation de 4h maximum. Au-delà de ce temps, il convient de nettoyer le masque et de remettre un filtre neuf.

Comment nettoyer un masque de la gamme Si-Mask™ ?

3 méthodes de nettoyage sont définies dans la notice d'utilisation du produit :

- Nettoyage en pulvérisant de l'alcool isopropylique ;
- Nettoyage au gel hydro-alcoolique ;
- Nettoyage à l'eau bouillante.

Puis-je stériliser un masque de la gamme Si-Mask™ au micro onde ?

Surtout pas, la présence d'une pièce métallique au niveau de la barrette nasale ne permet pas de stérilisation au micro-onde.

Peut-on utiliser un autre filtre ?

Le filtre défini et testé permet une filtration de 98% de particules de 3µm (critère UNS I). Il est de la responsabilité de l'utilisateur de changer de type de filtre, et donc in fine des capacités de filtration.

Quand utiliser un masque de la gamme Si-Mask™ ?

Comme tous les autres masques, il est conseillé de porter le masque dans les lieux publics, les lieux privés avec passage et notamment les lieux clos. N'effectuez pas d'activité physique intense avec le port d'un masque de la gamme Si-Mask™.

Où acheter un masque de la gamme Si-Mask™ ?

Vous pouvez acheter un masque de la gamme Si-Mask™ sur la boutique en ligne www.si-line.eu.

Pour les professionnels, ou pour une commande supérieure à 10 pièces, adressez votre demande à si-mask@sterne-elastomere.com.

MASQUE BARRIERE UNSI
REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



silicone
•mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

Un composant de mon masque est cassé ou défectueux. Peut-on acheter les pièces de rechange pour un masque de la gamme Si-Mask™ ?

Munissez-vous de votre notice d'utilisation. A l'aide de la partie composition, identifiez le ou les composants défectueux et adressez votre demande à si-mask@sterne-elastomere.com.

Où sont fabriqués les masques de la gamme Si-Mask™ ?

Les masques de la gamme Si-Mask™ sont entièrement conçus, fabriqués, confectionnés et emballés en France, à Cavaillon.

Les masques de la gamme Si-Mask™ sont en silicone, mais qu'en est-il du confort de l'utilisateur ?

Les masques de la gamme Si-Mask™ sont conçus pour le confort de l'utilisateur. En effet, en plus de la souplesse du silicone utilisé, les masques ne comportent aucune arête vive et leur touché « peau de pêche » permettent un confort optimal. De plus, tous les silicones utilisés pour la fabrication des masques de la gamme Si-Mask™ sont de grade médical, pouvant ainsi être utilisés pour le contact cutané sans risques pour l'utilisateur.

Qui peut utiliser les masques de la gamme Si-Mask™ ?

La conception du masque, couplée à la souplesse du silicone et la barrette nasale, s'adapte à la majorité des morphologies et permet l'utilisation du masque sur petite ou grosse tête.

De plus, à ce jour il existe deux versions : le modèle enfant et le modèle adulte.

J'ai une question ou une demande particulière. A qui puis-je m'adresser ?

N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante si-mask@sterne-elastomere.com.